

Il dispositivo che vi è stato consegnato è stato costruito secondo le più moderne tecnologie, utilizzando materiali di altissima qualità e precisione, nel rispetto delle normative vigenti (CE 93/42).

Per qualsiasi disturbo, dolenza o dubbi vari contattate con urgenza lo specialista che vi ha installato il dispositivo

Le attivazioni si possono eseguire solo con l'apposita chiavetta fornita con il dispositivo.

Tipi di disgiuntori:



**Espansore anatomico 10/12 mm**   
un giro (4 attivazioni) = 0,8 mm  
massimo 60 attivazioni



**Espansore trasversale 9/11/13 mm**   
un giro (4 attivazioni) = 0,8 mm  
massimo 60 attivazioni



**Espansore monobraccio 12 mm**   
un giro (4 attivazioni) = 0,8 mm  
massimo 50 attivazioni



**Espansore Ventaglio 9 mm**   
un giro (4 attivazioni) = 0,9 mm  
massimo 40 attivazioni



**Espansore Ventaglio Liou 9 mm**   
un giro (4 attivazioni) = 0,9 mm  
massimo 40 attivazioni



Studio dentistico: \_\_\_\_\_

## Scheda d'uso per disgiuntori

Nome \_\_\_\_\_

data di applicazione: \_\_\_\_\_

durata terapia : \_\_\_\_\_

note : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Cartella di verifica

giorno	mattino	sera	totale
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

giorno	mattino	sera	totale
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			